

โคมไฟ รุ่น ZC-0803

โคมไฟรุ่น ZC-0803 ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก, แผนกผู้ป่วยนอก, แผนกสตูดิโอ, ศัลยกรรมขนาดเล็ก หรือห้องทำงานของแพทย์ สามารถปรับแสงสว่างได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงฐานของโคมไฟมีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีกระจกกรองแสงทำให้แสงสว่างเหมือนแสงตามธรรมชาติ

ข้อกำหนดทางเทคนิค

- ⇒ อุณหภูมิสี 3,000 - 6,000K
- ⇒ กำลังส่องสว่าง $\geq 10,000$ Lux (50 ซม. จากหัวโคมไฟ)
- ⇒ ใช้ไฟฟ้า AC 220V $\pm 22V$, 50Hz $\pm 1Hz$
- ⇒ กำลังไฟที่ใช้ 3 วัตต์
- ⇒ ชนิดหลอดไฟ LED 3 วัตต์
- ⇒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแสงสว่าง 100 - 250 มม.
- ⇒ หัวโคมไฟขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม.
จึงไม่กีดขวางขณะใช้งาน
- ⇒ แขนโคมไฟยืดหยุ่นยาว 700 มม. สามารถกำหนดตำแหน่งของระยะและมุมของไฟได้สะดวกต่อการใช้งาน


การประกอบโคมไฟและการใช้งาน

โคมไฟมีส่วนประกอบดังนี้คือ ตัวโคมไฟ, ขาโคมไฟ และฐานโคมไฟ

การประกอบโคมไฟ

1. ต่อขาโคมไฟเข้ากับฐานโคมไฟ
2. ต่อตัวโคมไฟเข้ากับขาโคมไฟแล้วขันน็อตให้แน่น

ส่วนประกอบโคมไฟ

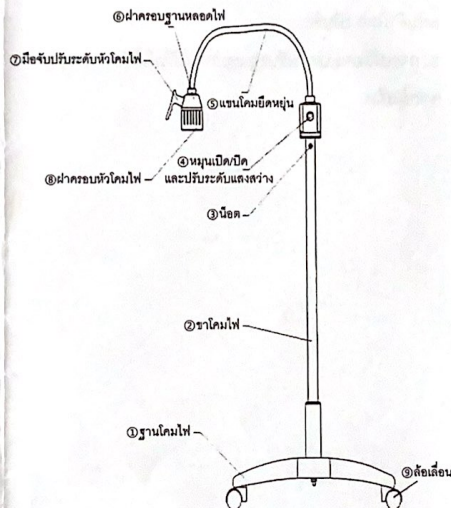

การใช้งาน

1. เคลื่อนย้ายโคมไฟ โดยใช้มือจับตรงขาโคมไฟแล้วดันให้เคลื่อนที่
2. ปรับระยะการใช้งาน โดยใช้มือจับที่ขาโคมไฟแล้วใช้อีกมือจับที่มือจับปรับระดับหัวโคมไฟ แล้วดึงปรับระยะที่เหมาะสมกับการใช้งาน
3. ปรับระดับความสว่าง โดยเปิดสวิตช์ที่อยู่ตรงมือจับปรับระดับหัวโคมไฟแล้วหมุนปุ่มปรับระดับแสง โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มแสงสว่างและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดแสงสว่าง
4. ปิดสวิตช์ หมุนปุ่มปรับระดับแสงสว่างแบบทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งมีเสียงดัง "คลิก" ก็จะปิดการใช้งานชั่วคราวของสวิตช์เปิดที่มือจับปรับระดับหัวโคมไฟ
5. การเปลี่ยนหลอดไฟให้ถอดฝาครอบหัวโคมไฟออกแล้วหมุนหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนหลอดใหม่แล้วใส่ฝาครอบหัวโคมไฟกลับตามเดิม

หมายเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดไฟช็อตควรปิดสวิตช์ไฟก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ และควรเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อหลอดไฟเย็นแล้วหรือควรสวมถุงมือเพื่อป้องกันความร้อนของหลอดไฟ

ชุดอุปกรณ์

1. หัวโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ 1 ชุด
2. ขาโคมไฟ 1 ชิ้น
3. ฐานโคมไฟ 1 ชิ้น
4. คู่มือการใช้งาน

การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

1. ใช้ผ้าเปียกเล็กน้อยเช็ดทำความสะอาดบริเวณตัวโคมไฟ
2. เก็บโคมไฟในที่ร่ม, มีความชื้นน้อยกว่า 80%, ปราศจากสารกัดกร่อน และถ่ายเทอากาศได้ดี
3. ในการเคลื่อนย้ายโคมไฟ ควรระมัดระวังการสั่นสะเทือนและความชื้น

แผนบริการ : 02-449-4219

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

(เปิดตามวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อควรระวัง

1. ควรต่อจนวงกันไฟฟ้าลัดวงจรแบบเฟสเดียว
2. ไม่ควรจับฝาครอบหลอดไฟขณะใช้งาน เพราะความร้อนอาจทำให้มือพองได้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้าตามปกติยกเว้น

1. การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือการใช้งาน
2. ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้, แผ่นดินไหว เป็นต้น
3. การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ผลิต


Rev.1



คู่มือการใช้งาน

EXAMINATION LAMP

ZC-0803

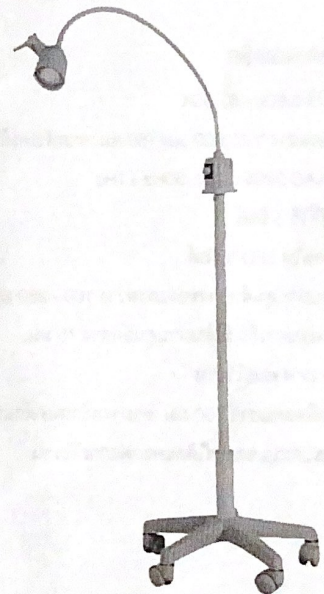

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ