

โคมไฟ รุ่น SL-1082

- ⇒ คุณภาพสูงและประหยัดพลังงาน โดยใช้หลอดไฟแบบแสงเย็น LED
- ⇒ รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นแสงเย็นที่ให้แสงสว่างได้มากและเป็นแสงแบบธรรมชาติ
- ⇒ ใช้งานได้นาน ไม่นต่ำกว่า 20,000 ชม.
- ⇒ น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก
- ⇒ แขนโคมสามารถยืดหยุ่นปรับตามความถนัดและความเหมาะสมในการใช้งาน


ข้อกำหนดทางเทคนิค

- ⇒ อุณหภูมิสี: 3,000 - 5,000K
- ⇒ ความสว่าง: $\geq 12,000$ Lux (30cm from lamp adapter)
- ⇒ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: $\leq 8^{\circ}\text{C}$
- ⇒ ไฟฟ้าที่ใช้: AC220V \pm 22V, 50Hz + 1 Hz
- ⇒ กำลังไฟฟ้าที่ใช้: ≤ 3.5 W
- ⇒ ชนิดหลอดไฟ: LED 3V/0.5W x 8
- ⇒ ระยะการใช้งานของแสงสว่างที่ดีที่สุด: 300 mm - 500 mm จากหัวโคมไฟ
- ⇒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 80 - 120 mm
- ⇒ น้ำหนัก: 1.8 KG

การประกอบโคมไฟและการใช้งาน

การประกอบโคมไฟ

- ⇒ ก่อนประกอบโคมไฟ ตรวจสอบเช็คลูกปกรณ์ให้ครบตามรายการที่แจ้งในกล่องบรรจุและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้
- ⇒ ก่อนประกอบโคมไฟ ตรวจสอบเช็คลูกปกรณ์ให้ครบตามรายการที่แจ้งในกล่องบรรจุและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้

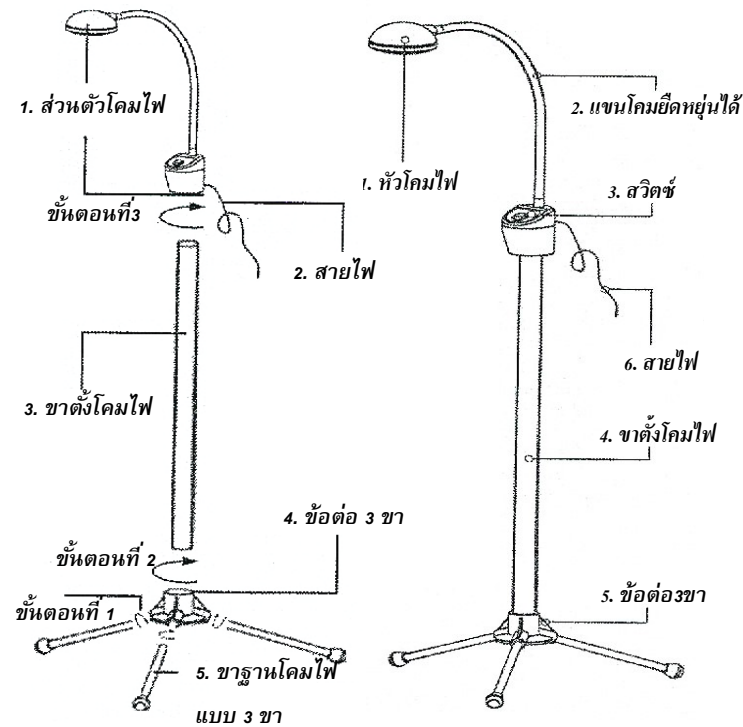

รูป 1

รูป 2

ขั้นตอนในภาพประกอบ

1. ต่อขารฐานโคมไฟ (หมายเลข 5) กับขั้วต่อขารฐานโคมไฟ (หมายเลข 4) แล้วขันน็อตให้แน่น
2. ต่อขาตั้งโคมไฟ (หมายเลข 3) กับ ขั้วต่อขารฐานโคมไฟ (หมายเลข 4) โดยหมุนขาตั้งโคมไฟตามลูกศรดังรูป ด้านบนให้แน่น
3. ต่อส่วนตัวโคมไฟ (หมายเลข 1) กับขาตั้งโคมไฟ (หมายเลข 3) เสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์ไฟ

การใช้งาน

1. เสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์ (“1” หมายถึง เปิด, “0” หมายถึง ปิด)
2. ปรับแขนโคมให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้มือข้างหนึ่งจับที่ขาตั้ง โคมไฟ (หมายเลข 3) ไว้เพื่อป้องกันโคมไฟล้มคว่ำ
3. เมื่อเลิกใช้งานให้กดสวิตช์ปิดไฟ

การเก็บและการขนย้ายอุปกรณ์

- ⇒ ควรเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวกและมีความชื้นน้อยกว่า 80% ปราศจากการกักตัวของก๊าซ
- ⇒ ในการขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายควรหลีกเลี่ยงการกระแทก, การเขย่า และความชื้น

การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

- ⇒ ในการใช้งานปกติ ควรใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 10°C - 30°C , ความชื้นสัมพัทธ์ ≤70%, ความดัน 86 KPa - 106 KPa, ใช้กำลังไฟฟ้า 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz
- ⇒ ควรได้รับการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- ⇒ ตัวบ่งแสง และตัวสะท้อนแสง ควรทำความสะอาดเป็นครั้งคราว
- ⇒ เมื่อตัวสะท้อนแสงเสียควรเปลี่ยนใหม่ทันที
- ⇒ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายทันที

ข้อควรระวัง

- ⇒ ไม่ควรให้แสงส่องถูกนัยน์ตาผู้ป่วยโดยตรงในระหว่างการใช้งาน
- ⇒ ตรวจสอบการเชื่อมต่อในพื้นที่ใช้งานให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดึงออก
- ⇒ ควรทำการติดตั้งและซ่อมบำรุงโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- ⇒ ไม่ควรใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง หรือในที่ติดไฟได้ง่าย
- ⇒ ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟออกก่อนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
- ⇒ ในกรณีที่ใช้งานไม่ได้ ให้ปิดสวิตช์ไฟก่อนเพื่อป้องกันการใช้งานของคอมไฟและเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

เงื่อนไขต่อไปนี้อาจไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

- ⇒ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกลุ่มการใช้งาน
- ⇒ ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้, แผ่นดินไหว เป็นต้น
- ⇒ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ผลิต



MOBILE OPERATING AUXILIARY LIGHTING LAMP SL-1082



คู่มือการใช้งาน